

Istruzioni personalizzate

Torino, 16 Settembre 2015

Signor Giovanni Rossi

Avvertenze!

- Non creare pieghe sui diffusori (in particolare sui diffusori a fascia).
- Non tirare o attorcigliare i cavi.
- Non riporre o trasportare l'apparecchiatura nella valigetta con alimentatore e diffusori innestati.
- Conservare l'imballo e il materiale di riempimento per la successiva spedizione.


Il dispositivo è stata programmata **secondo le Sue necessità** da personale specializzato prima della spedizione.

Pertanto, per sottoporsi a terapia, sarà sufficiente seguire le seguenti istruzioni:

1 Collegamenti e Posizionamento dei diffusori

1

- Innestare il connettore del diffusore Fascia nei canali **AF-1**.
Innestare il connettore del diffusore Localizzato BF nei canali **BF-1**.
Posizionare i diffusori come mostrato in figura.
Bloccarli in posizione con gli appositi velcri.

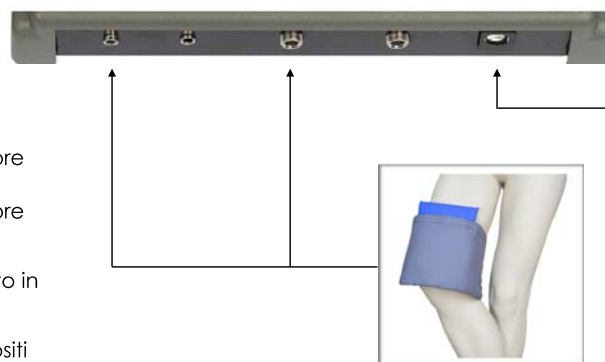

2 Avviare la terapia

2

Procedere come indicato:

1. Accendere lo strumento premendo il tasto **ON**.
2. Lanciare la terapia premendo il tasto **START**.
Sullo schermo apparirà il messaggio «**Terapia avviata correttamente**».

3 Concludere una seduta

3

- Al termine della seduta, l'apparecchio emetterà un suono di avviso (con modalità SLEEP disattivata). Sullo schermo apparirà il messaggio: «**Terapia conclusa. Mantenere premuto OFF**».
- Spegnere l'apparecchio premendo e mantenendo premuto il tasto **OFF** fino all'effettivo spegnimento dello schermo.

Note: In base alla prescrizione medica allegata all'ordine, sottoporsi a terapia almeno 2 volte al giorno.